

## CUÑAS Y BOTELLAS MASCULINAS

Para la recogida de fluidos biológicos humanos (heces y orina). Limpiar y desinfectar antes de su uso. Sin esterilizar. El producto no está fabricado con látex de goma natural o goma natural seca. Producto sanitario.

### Finalidad prevista:

La cuña tiene la finalidad de recoger la orina y/o heces en pacientes encamados o con movilidad reducida. La botella masculina tiene la finalidad de recoger la orina en pacientes varones encamados. Tanto la cuña como la botella están destinadas al uso hospitalario y/o domiciliario.

### Precauciones generales:

1. No apto para cualquier otra aplicación que no sea su uso previsto.
2. El uso de la cuña y la botella masculina no presenta ninguna dificultad para los usuarios previstos.
3. En el caso de rotura del envase no utilizar la cuña o la botella masculina.
4. Limpiar con detergente y desinfectar con lejía u otros desinfectantes, antes de cada uso. La cuña y la botella son aptas para su uso en lavadoras desinfectadoras y para su esterilización en autoclave.
5. La vida útil viene determinada por el desgaste y deterioro debidos al uso. Desechar cuando se detecten cambios de color, asperezas, deformaciones, etc.
6. Almacenar lejos de fuentes de calor.

### Glosario de símbolos:

 <b>REF</b>	Número de catálogo	 <b>LOT</b>	Número de lote	 Fecha de caducidad
 <b>MD</b>	Producto Sanitario	 <b>QTY</b>	Cantidad	 Marcado CE
 Manténgase fuera de la luz del sol		 Fabricante		 No utilizar si el envase está dañado
 <a href="http://www.deltalab.es">www.deltalab.es</a>	Consulte las instrucciones de uso en <a href="http://www.deltalab.es">www.deltalab.es</a> o en el enlace <a href="http://bit.ly/eifus">http://bit.ly/eifus</a>			

En caso de incidente grave\* relacionado con el producto, comunicar tanto a Deltalab, S.L. como a la autoridad competente del Estado en el que se establezca el usuario. \*Se entiende como "incidente grave" aquel que conlleve el fallecimiento o deterioro grave de la salud del paciente o usuario o bien una grave amenaza para la salud pública.