

est

## KEELESPAATEL

Ühekordseks kasutamiseks. Toote mitmekordne kasutamine võib soodustada nakkushaiguste levikut. Valikus kaks materjali:

- kvaliteetne puit, purunemiskindla struktuuriga ja suupiirkonna vigastamise vältimiseks ümarate servadega.
- mittemürgine plastik (polüstüreen), bioühilduv ja suupiirkonna vigastamiseks ümarate servadega.

Toote mehhaaniline tugevus tagab, et see kasutamise ajal ei purune. Kasutatakse keelespaatlina suupiirkonnast hea ülevaate saamiseks ning ninaneelust proovi võtmisel, et vältida proovi saastumist. Müügil hulgi.

Spaatel on mõeldud kasutamiseks kliinilises ja haiglateskkonnas. Spaatli kasutamine on sihtgrupi jaoks lihtne. Sobib kasutamiseks ainult ettenähtud eesmärgil. Määratud spaatlit kasutada ei tohi. Kui spaatel on katki või kui selle servast on murdunud kilde, tuleb see ära visata. Spaatli purunemine ei ole tõenäoline, kuid võib kasutamisel tugeva surve avaldamisel puruneda.

Katkine spaatel tuleb kohe ära visata. Spaatlid ei vaja spetsiaalseid hoiutingimusi. Spaatlid on kasutusotstarbest tingitult mõeldud tervishoiusektori kasutajatele ning kasutatud tooted tuleb visata bioloogiliste jäätmete konteinerisse ja nõuetekohaselt ringlusest eemaldada. Kasutatud spaatlid tuleb dekontamineerida või neid tuleb käsitleda saastunud meditsiinijäätmetena. Kõik laborid on kohustatud jäätmeid vastavate eeskirjade kohaselt käsitlema, töötleva ning ringlusest eemaldama. Kasutamata spaatlid ei ole ohtlikud ning need võib ära visata mitteohtliku tootena.



Ühekordseks kasutamiseks



CE märgistus



Tootja



Meditsiineide



[deltalab.es/efus](http://deltalab.es/efus)

Tutvuda veebilehel avaldatud kasutusjuhendiga



Aegumiskuupäev



Katalooginumber



Partiinumber

Tootega seotud tõsise intsidi\* korral teavitage mõlemat Deltalab, S.L. samuti selle riigi pädev asutus, kus kasutaja on asutatud. \*Tõsine intsident on juhtum, mis toob kaasa patsiendi või kasutaja surma või tervise tõsise halvenemise või tõsise ohu rahvatervisele.



DELTALAB, S.L.  
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,  
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.  
[deltalab@deltalab.es](mailto:deltalab@deltalab.es) - [www.deltalab.es](http://www.deltalab.es)