

pt

DEPRESSOR LINGUAL

Produto de utilização única. A reutilização deste produto pode causar infeções. É comercializado em dois materiais:

- Madeira de alta qualidade, não estilhaçável e com bordos arredondados para evitar agressões na zona bucal.
- Plástico (poliestireno) atóxico, biocompatível e com bordos arredondadas para evitar agressões na zona bucal.

Tem uma consistência mecânica suficiente para garantir a impossibilidade de quebrar durante a sua utilização. É usado como depressor da língua para conseguir uma visualização correta da zona bucal e para prevenir as contaminações durante a recolha de amostras da garganta e da nasofaringe. Apresentação em massa

O depressor destina-se a ser usado em ambientes clínicos-hospitalares. O uso do depressor não apresenta qualquer dificuldade para os utilizadores previstos. Não é adequado para qualquer outra aplicação que não seja a utilização prevista. Não deve ser usado se houver sinais de quebra ou deterioração da embalagem. Se se verificar que a embalagem unitária perdeu a sua integridade, não se deve usar o depressor, uma vez que não há garantia de esterilidade.

Não se deve usar se houver sujidade no depressor. Eliminar o produto se se encontrar algum quebrado ou com farpas. Os depressores não necessitam de condições especiais de conservação. Devido ao uso previsto para o produto, os destinatários pertencem ao setor da saúde e dispõem de contentores de resíduos biológicos, onde se deve eliminar o produto utilizado e geri-lo como resíduo biológico. Os depressores, uma vez usados, devem ser descontaminados ou tratados como resíduos hospitalares contaminados. É responsabilidade de cada laboratório manusear, tratar e eliminar os resíduos de acordo com a regulamentação. Os depressores não utilizados podem ser considerados produtos não perigosos e podem ser eliminados de acordo com este critério.



Não reutilizar



Marcação CE



Fabricante



Aparelho médico



deltalab.es/eifus

Consultar as instruções de utilização no website



Prazo de validade



Número de catálogo



Código do lote

No caso de um incidente grave* relacionado com o produto, notifique a Deltalab, S.L. bem como a autoridade competente do Estado em que o usuário está estabelecido. *Entende-se por "incidente grave" aquele que acarreta a morte ou grave deterioração da saúde do doente ou usuário ou uma grave ameaça à saúde pública.



DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
deltalab@deltalab.es - www.deltalab.es