

est

PAP-TESTI SPAATEL AYRE

Ühekordseks kasutamiseks. Toote mitmekordne kasutamine võib soodustada nakkushaiguste levikut. Valikus kaks materjali:
- kvaliteetne puit, purunemiskindla struktuuriga ja limaskesta ning kudede vigastamise vältimiseks ümarate servadega.
- mittemürgine plastik (löögikindel polüstüreen), bioühilduv ja limaskesta ning kudede vigastamiseks ümarate servadega.

Toote mehhaaniline tugevus tagab, et see kasutamise ajal ei purune. Toode on mõeldud spetsialiseerunud tervishoiutöötajale, et sobivates hügieenilistes tingimustes hõlbustada emakakaelast proovi võtmist. Müügil hulgi.

Spaatel on mõeldud kasutamiseks kliinilises ja haiglateskkonnas. Spaatli kasutamine on sihtgrupi jaoks lihtne. Sobib ainult ettenähtud eesmärgiks. Määratud spaatlit kasutada ei tohi. Kui spaatel on katki või kui selle servast on murdunud kilde, tuleb see ära visata. Spaatli kasutamisel ei tohi kasutada suurt jõudu, sest see võib sel juhul puruneda (mis on ebatõenäoline, sest harja purustamiseks on vaja kasutada märkimisväärset jõudu). Katkine spaatel tuleb kohe ära visata. Spaatlid ei vaja spetsiaalseid hoiutingimusi. Spaatlid on kasutusotstarbest tingitult mõeldud tervishoiusektori kasutajatele ning kasutatud tooted tuleb visata bioloogiliste jäätmete konteinerisse ja nõuetekohaselt ringlusest eemaldada. Kasutatud spaatlid tuleb dekontamineerida või neid tuleb käsitleda saastunud meditsiinijäätmetena. Kõik laborid on kohustatud jäätmeid vastavate eeskirjade kohaselt käsitlema, töötleva ning ringlusest eemaldama. Kasutamata spaatlid ei ole ohtlikud ning need võib ära visata mitteohtliku tootena.



Ühekordseks kasutamiseks



CE märgistus



Tootja



Meditsiiniseade



deltalab.es/efus

Tutvuda veebilehel avaldatud kasutusjuhendiga



Aegumiskuupäev



Katalooginumber



Partiinumber

Tootega seotud tõsise intsidendi* korral teavitage mõlemat Deltalab, S.L. samuti selle riigi pädev asutus, kus kasutaja on asutatud. *Tõsine intsident on juhtum, mis toob kaasa patsiendi või kasutaja surma või tervise tõsise halvenemise või tõsise ohu rahvatervisele.



DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
deltalab@deltalab.es - www.deltalab.es