

it

AYRE SPATULA

Prodotto monouso. Il riutilizzo di questo prodotto può causare infezioni. Viene venduto in 2 materiali:

- Legno di alta qualità, consistenza infrangibile e bordi arrotondati per evitare aggressività su mucose e tessuti.
- Plastica atossica (polistirolo antiurto) con bordi arrotondati per evitare aggressività su mucose e tessuti.

Ha una consistenza meccanica sufficiente per garantire l'impossibilità di rottura durante l'uso. Prodotto studiato per facilitare il prelievo di campioni cervicali da parte di personale sanitario specializzato e in condizioni igieniche adeguate. Presentazione in blocco.

La spatola è destinata all'uso in ambienti clinico-ospedalieri. L'utilizzo della spatola non presenta alcuna difficoltà per gli utenti previsti. Non adatto per qualsiasi altra applicazione diversa dall'uso previsto. Non deve essere utilizzato se si osserva sporco sulla spatola. Scartare il prodotto se si riscontrano rotture o schegge. Non si deve esercitare una forte pressione durante l'uso in quanto la spatola potrebbe rompersi (improbabile poiché la forza necessaria per romperla è notevole). In caso di rottura, scartare immediatamente. Le spatole non richiedono particolari condizioni di conservazione. A causa della destinazione d'uso del prodotto, i destinatari appartengono al settore sanitario, e dispongono di contenitori per rifiuti biologici dove il prodotto usato deve essere smaltito e gestito come rifiuto biologico. Le spatole, una volta utilizzate, devono essere decontaminate o trattate come rifiuti ospedalieri contaminati. È responsabilità di ogni laboratorio gestire, trattare e smaltire i rifiuti secondo le normative. Le spatole inutilizzate possono essere considerate prodotti non pericolosi e possono essere smaltite secondo questi criteri.



Non riutilizzare



Marcatura CE



Fabbricante



Dispositivo medico



deltalab.es/eifus

Consultare le istruzioni per l'uso sul sito Web



Data di scadenza



Numero di catalogo



Codice di lotto

In caso di incidente grave* relativo al prodotto, avvisare sia Deltalab, S.L. nonché l'autorità competente dello Stato in cui è stabilito l'utente. *Per "incidente grave" si intende quello che comporta un decesso o un grave peggioramento della salute del paziente o dell'utilizzatore o una grave minaccia per la salute pubblica.



DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
deltalab@deltalab.es - www.deltalab.es