

pt

ESPÁTULA DE AYRE

Produto de uso único. A reutilização deste produto pode causar infeções. Comercializada em 2 materiais:

- Madeira de alta qualidade, de consistência inquebrável e bordos redondos para evitar as agressões sobre as mucosas e tecidos.
- Plástico (Poliestireno anti-choque) atóxico, com bordos redondos para evitar as agressões sobre as mucosas e tecidos.

Tem uma consistência mecânica suficiente para assegurar a impossibilidade de quebra durante o seu uso. Produto destinado a facilitar a colheita de amostras cervicais por profissionais de saúde especializados nas condições de higiene apropriadas. Apresentação em massa.

A espátula é destinada a ser utilizada em ambientes clínico-hospitalares. O uso da espátula não apresenta nenhuma dificuldade para os utilizadores previstos. Não está apta a qualquer outra aplicação que não seja o uso previsto. Não usar se houver sujidade na espátula. Descarte o produto caso este esteja partido ou com lascas. Não se deve exercer uma pressão forte durante a utilização, visto que a espátula poderia partir-se (pouco provável, pois é necessária uma força considerável para a espátula partir). Em caso de quebra, descartar imediatamente. As espátulas não necessitam de condições especiais de conservação. Devido ao uso previsto do produto, os destinatários pertencem ao sector da saúde e dispõem de contentores de resíduos biológicos onde se deve descartar o produto utilizado e gerido como resíduo biológico. As espátulas, uma vez usadas, devem ser descontaminadas ou tratadas como resíduos hospitalares contaminados. É da responsabilidade de cada laboratório manipular, tratar e eliminar os resíduos de acordo com as regulamentações. As espátulas não utilizadas podem-se considerar produtos não perigosos e podem eliminar-se segundo esse critério.



Não reutilizar



Marcação CE



Fabricante



Aparelho médico



deltalab.es/eifus

Consultar as instruções de utilização no website



Prazo de validade



Número de catálogo



Código do lote

No caso de um incidente grave* relacionado com o produto, notifique a Deltalab, S.L. bem como a autoridade competente do Estado em que o usuário está estabelecido. *Entende-se por "incidente grave" aquele que acarreta a morte ou grave deterioração da saúde do doente ou usuário ou uma grave ameaça à saúde pública.



DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
deltalab@deltalab.es - www.deltalab.es