

est

## TSÜTOLOOGIAHARI

Ühekordseks kasutamiseks. Toote mitmekordne kasutamine võib soodustada nakkushaiguste levikut.

Toode on mõeldud kasutamiseks laboratoorsesel uuringutel (tsütoloogilised, anatomopatoloogilised, mikrobioloogilised jne) emakakaelast proovide võtmiseks. Harja vorm ja tekstuur võimaldavad limaskestast kahjustamata võtta proove täpselt. Juhul kui proovi soovitakse kasutada mitme analüüsi läbi viimiseks, võimaldab hari kasutajal koguda piisava koguse proovi. Toode on mõeldud spetsialiseerunud meditsiinitöötajatele sobivates hügieenilistes tingimustes emakakaelast proovide võtmiseks. Toode ei tohi kasutada raseduse korral. Müügil hulgi.

Tsütoloogiahari on mõeldud kasutamiseks kliinilises ja haiglateskkonnas. Harja kasutamine on sihtgrupi jaoks lihtne. Sobib kasutamiseks ainult ettenähtud eesmärgil.

Määrduvad harja kasutada ei tohi. Katkine või ilma peata hari tuleb ära visata. Tsütoloogiahari võib suure jõu kasutamise korral puruneda (mis on ebatüüpiline, sest harja purustamiseks on vaja kasutada märkimisväärset jõudu). Katkine hari tuleb kohe ära visata. Harjad ei vaja spetsiaalseid hoiutingimusi.

Harjad on kasutusotstarbest tingitult mõeldud tervishoiusektori kasutajatele ning kasutatud tooted tuleb visata bioloogiliste jäätmete konteinerisse ja nõuetekohaselt ringlusest eemaldada. Kasutatud harjad tuleb dekontamineerida või neid tuleb käsitleda saastunud meditsiinijäätmetena. Kõik laborid on kohustatud jäätmeid vastavate eeskirjade kohaselt käsitlema, töötleva ning ringlusest eemaldama. Kasutamata harjad ei ole ohtlikud ning need võib ära visata mitteohtliku tootena.



Ühekordseks kasutamiseks



CE märgistus



Tootja



Meditsiinease



[deltalab.es/efus](http://deltalab.es/efus)

Tutvuda veebilehel avaldatud kasutusjuhendiga



Aegumiskuupäev



Katalooginumber



Partiinumber

Tootega seotud tõsise intsidendi\* korral teavitage mõlemat Deltalab, S.L. samuti selle riigi pädev asutus, kus kasutaja on asutatud. \*Tõsine intsident on juhtum, mis toob kaasa patsiendi või kasutaja surma või tervise tõsise halvenemise või tõsise ohu rahvatervisele.



DELTALAB, S.L.  
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,  
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.  
[deltalab@deltalab.es](mailto:deltalab@deltalab.es) - [www.deltalab.es](http://www.deltalab.es)