

fr

BROSSE ENDOCERVICALE

À usage unique. La réutilisation de ce produit peut causer des infections.

Il est utilisé dans les échantillons endocervicaux pour les études de laboratoire (cytologique, pathologique, microbiologiques, etc.). La forme et la texture de la tête vous permettent de prendre une quantité suffisante d'échantillon dans le cas où vous devez effectuer plus d'un test. Produit conçu pour faciliter l'échantillonnage du col de l'utérus par un personnel de santé qualifié et dans des conditions d'hygiène appropriées. Il ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. Emballage in vrac.

La brosse col de l'utérus est destinée à être utilisée dans des environnements cliniques et hospitaliers. L'utilisation de la brosse cervicale ne présente aucune difficulté pour les utilisations prévues. Ne pas utiliser pour toute autre application que son utilisation prévue. Ne pas utiliser si la saleté est observée dans la brosse. Jeter le produit s'il est cassé ou sans tête.

Ne pas exercer une forte pression pendant l'utilisation, car la brosse cervicale peut casser (peu probable puisque la force nécessaire pour briser est considérable). En cas de rupture, jeter immédiatement. Les brosses cervicales ne nécessitent pas de conditions particulières de conservation.

En raison de l'utilisation prévue du produit, il doit être utilisé par un personnel de santé qui possède des conteneurs biologiques, car il est considéré comme un déchet biologique. Les brosses cervicales, une fois utilisées, doivent être décontaminées ou traitées comme des déchets médicaux contaminés. Il est de la responsabilité de chaque laboratoire de gérer, traiter et éliminer les déchets selon les règlements. Les brosses non utilisées peuvent être considérées comme non dangereuses et peuvent être éliminées par ce critère.



Ne pas réutiliser



CE marking



Fabricant



Dispositif médical



deltalab.es/eifus

Consulter le mode d'emploi sur le site web



Date de péremption



Numéro de référence



Code du lot

En cas d'incident grave* lié au produit, merci de le communiquer à la fois à Deltalab, S.L. mais aussi à l'autorité compétente de l'État dans lequel l'utilisateur est établi. *Par "incident grave", on entend ce qui entraîne la mort ou une dégradation grave de la santé du patient ou de l'utilisateur ou bien alors une menace importante pour la santé publique.



DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
deltalab@deltalab.es - www.deltalab.es