

it

## SPAZZOLA CERVICALE

Prodotto monouso. Il riutilizzo di questo prodotto può causare infezioni.

Viene utilizzato nel prelievo di campioni endocervicali per studi di laboratorio (citologici, patologici, microbiologici, ecc.). La forma e la consistenza della testa consentono di prelevare una quantità sufficiente di campione nel caso si debba eseguire più di una prova. Prodotto studiato per facilitare il prelievo di campioni cervicali da parte di personale sanitario specializzato e in condizioni igieniche adeguate. Non dovrebbe essere usato in caso di gravidanza. Presentazione in blocco.

Lo spazzolino cervicale è destinato all'uso in ambienti clinico-ospedalieri. L'utilizzo dello scovolino cervicale non presenta alcuna difficoltà per gli usi previsti. Non adatto per applicazioni diverse da quella per cui è destinato. Non deve essere utilizzato se si osserva sporco sulla spazzola. Scartare il prodotto se viene trovato rotto o senza testa.

Non si deve esercitare una forte pressione durante l'uso, poiché lo spazzolino cervicale potrebbe rompersi (improbabile poiché la forza necessaria per romperlo è considerevole). In caso di rottura, scartare immediatamente. Gli spazzolini cervicali non richiedono condizioni di conservazione speciali.

A causa della destinazione d'uso del prodotto, i destinatari appartengono al settore sanitario, e dispongono di contenitori per rifiuti biologici, dove il prodotto utilizzato deve essere smaltito e gestito come rifiuto biologico. Gli spazzolini cervicali, una volta utilizzati, devono essere decontaminati o trattati come rifiuti ospedalieri contaminati. È responsabilità di ogni laboratorio gestire, trattare e smaltire i rifiuti secondo le normative. Le spazzole inutilizzate possono essere considerate prodotti non pericolosi e possono essere smaltite secondo questi criteri.



Non riutilizzare



Marcatura CE



Fabbricante



Dispositivo medico



[deltalab.es/eifus](http://deltalab.es/eifus)

Consultare le istruzioni per l'uso sul sito Web



Data di scadenza



Numero di catalogo



Codice di lotto

In caso di incidente grave\* relativo al prodotto, avisare sia Deltalab, S.L. nonché l'autorità competente dello Stato in cui è stabilito l'utente. \*Per "incidente grave" si intende quello che comporta un decesso o un grave peggioramento della salute del paziente o dell'utilizzatore o una grave minaccia per la salute pubblica.



DELTALAB, S.L.  
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,  
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.  
[deltalab@deltalab.es](mailto:deltalab@deltalab.es) - [www.deltalab.es](http://www.deltalab.es)