

pt

ESCOVILHÃO CERVICAL

Produto de uso único. A reutilização deste produto pode causar infeções.

É utilizado para a recolha de amostras endocervicais destinadas a estudos de laboratório (citológicos, anatomopatológicos, microbiológicos etc.) A forma e a textura da cabeça permitem colher uma quantidade de amostra suficiente caso se tenha que realizar-se mais que uma prova. Produto destinado a facilitar a recolha de amostras cervicais por profissionais de saúde especializados nas condições de higiene apropriadas. Não deve ser utilizado em caso de gravidez. Apresentação em massa.

O escovilhão é destinado a ser utilizado em ambientes clínico-hospitalares. O uso do escovilhão não apresenta nenhuma dificuldade para os utilizadores previstos. Não está apta a qualquer outra aplicação que não seja o uso previsto. Não utilizar caso a embalagem esteja danificada. Não usar se houver sujidade no escovilhão.

Descarte o produto caso este esteja partido ou incompleto. Não se deve exercer uma pressão forte durante a utilização, visto que o escovilhão poderia partir-se (pouco provável, pois é necessária uma força considerável para o escovilhão partir). Em caso de quebra, descartar imediatamente. Os escovilhões não necessitam de condições especiais de conservação.

Devido ao uso previsto do produto, os destinatários pertencem ao sector da saúde e dispõem de contentores de resíduos biológicos onde se deve descartar o produto utilizado, e gerido como lixo biológico. Os escovilhões, uma vez usados, devem ser descontaminados ou tratados como resíduos hospitalares contaminados. É da responsabilidade de cada laboratório manipular, tratar e eliminar os resíduos de acordo com as regulamentações. Os escovilhões não utilizados podem-se considerar produtos não perigosos e podem eliminar-se segundo esse critério.



Não reutilizar



Marcação CE



Fabricante



Aparelho médico



deltalab.es/eifus

Consultar as instruções de utilização no website



Prazo de validade



Número de catálogo



Código do lote

No caso de um incidente grave* relacionado com o produto, notifique a Deltalab, S.L. bem como a autoridade competente do Estado em que o usuário está estabelecido. *Entende-se por "incidente grave" aquele que acarreta a morte ou grave deterioração da saúde do doente ou usuário ou uma grave ameaça à saúde pública.



DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
deltalab@deltalab.es - www.deltalab.es