

es

## DEPRESORES LINGUALES

**Producto utilizado como depresor de la lengua para conseguir una correcta visualización de la zona bucal y para prevenir las contaminaciones durante la toma de muestras de garganta y nasofaringe. Producto de un solo uso. Los depresores linguales son productos sanitarios (MD). Solo para uso profesional.**

### Finalidad prevista:

Producto destinado para el desplazamiento de la lengua para facilitar la exploración de los órganos o tejidos adyacentes. El depresor está destinado a ser utilizado en entornos clínico-hospitalarios.

### Presentación:




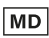





Se comercializan en dos materiales:

- Madera de alta calidad, de consistencia inastillable y de bordes redondeados para evitar agresiones en la zona bucal. Se envasan en cajas de cartón.

- Plástico (poliestireno) atóxico, biocompatible y de bordes redondeados para evitar agresiones en la zona bucal. Se envasan en bolsas con cierre minigrip.

### Precauciones generales:

1. La reutilización de este producto puede causar infecciones.
2. El uso del depresor no presenta ninguna dificultad para los usuarios previstos.
3. No apto para cualquier otra aplicación que no sea su uso previsto.
4. No debe usarse si se observa suciedad en el depresor.
5. Desechar el producto si se encuentra alguno roto o con astillas.
6. Tiene una consistencia mecánica suficiente para asegurar la imposibilidad de rotura durante su uso. Aunque es poco probable, ejercer una presión demasiado fuerte durante su uso podría romper el depresor. En caso de rotura, desechar inmediatamente.
7. Los depresores no precisan de condiciones especiales de conservación.
8. Debido al uso previsto del producto, los destinatarios pertenecen al sector sanitario y disponen de contenedores de residuos biológicos, donde se debe desechar el producto utilizado y gestionarlo como desecho biológico. Los depresores, una vez utilizados, se deben descontaminar o tratar como residuos hospitalarios contaminados. Es responsabilidad de cada laboratorio manipular, tratar y eliminar los residuos según las reglamentaciones. Los depresores no utilizados pueden considerarse productos no peligrosos y pueden eliminarse según este criterio.

 No reutilizar	 Marcado CE	 Fabricante
 Producto Sanitario	 Consultar instrucciones de uso en la página web <a href="http://www.deltalab.es/eifus">www.deltalab.es/eifus</a>	 Fecha de caducidad
 Referencia de catálogo	 Identificador único de dispositivo	 Número de lote

En caso de incidente grave\* relacionado con el producto, comunicar tanto a Deltalab, S.L. como a la autoridad competente del Estado en el que se establezca el usuario. \*Se entiende como "incidente grave" aquel que conlleve el fallecimiento o deterioro grave de la salud del paciente o usuario o bien una grave amenaza para la salud pública.

