

RECIPIENTE ESTÉRIL PARA RECOLHA DE AMOSTRAS

Para a obtenção, o armazenamento e o transporte de amostras clínicas humanas para a sua posterior análise.

Leia atentamente as instruções de utilização do produto antes de o utilizar.

Produto descartável. Produto estéril. O método de esterilização está indicado na embalagem primária.

O produto não é fabricado com látex de borracha natural ou borracha natural seca.

Produto sanitário para diagnóstico In Vitro.

Uso previsto:

Recipiente estéril para recolha de amostras (frascos, tubos ou conjuntos) concebido para a obtenção, o armazenamento e o transporte de amostras clínicas humanas (como urina, cuspo, fezes, etc.). O produto foi concebido para que, de acordo com o método, o doente ou outro utilizador predeterminado recolha a amostra de acordo com as instruções indicadas pelo seu profissional de saúde ou laboratório.

Precauções gerais:


- Não é adequado para nenhuma outra aplicação que não seja a indicada no seu uso previsto.
- Não aperte nem pressione o recipiente.
- Não utilize se o produto ou algum dos seus componentes estiver danificado, pois isso pode comprometer a esterilidade do produto.
- Não reutilize o produto. A reutilização deste produto pode afetar a posterior análise da amostra recolhida.
- Mantenha-o fora da luz solar.

Precauções especiais:

Os profissionais de saúde devem validar o uso do recipiente para as suas combinações específicas de instrumentos de ensaio e sistema de reagentes, e as condições de armazenamento de amostras.

Instruções para o doente

1. Lave bem as mãos e seque-as com papel absorvente.
2. Verifique se o recipiente está bem fechado e se o fecho de segurança, se presente, não foi aberto, pois isso poderia comprometer a esterilidade do produto. Retire a tampa do recipiente (quando for aplicável) e coloque-a virada para cima numa superfície plana, para que a parte interior da tampa não toque em nada, evitando a sua contaminação.
3. Recolha a amostra em conformidade com as instruções do centro/profissional de saúde, tendo tido em conta as considerações de preparação prévia que lhe indicaram.
4. Deposite a amostra diretamente no recipiente e volte a colocar a tampa (quando for aplicável) para evitar a contaminação. No caso de conjuntos, encha o tubo e descarte o restante da urina, bem como o recipiente de coleta. Coloque a tampa no tubo pressionando para evitar possíveis vazamentos futuros.
5. Devolva o recipiente ou tubos ao profissional de saúde depois da recolha da amostra.

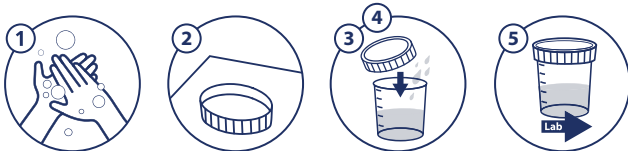

Instruções para o transporte da amostra:

1. Todos os recipientes, com amostras ou usados, devem ser classificados como de risco biológico para fins de manuseamento e eliminação. É da responsabilidade de cada laboratório manusear, tratar e descartar os resíduos de acordo com a legislação em vigor. Os recipientes não utilizados podem ser considerados como não perigosos e podem ser descartados de acordo com estes critérios.
2. Certifique-se de que os recipientes estão corretamente etiquetados com o nome do doente, o identificador, a data e a hora de obtenção e quaisquer informações adicionais exigidas pela política do seu centro.
3. Etiquete e embale adequadamente qualquer recipiente utilizado para transportar a amostra para outro lugar, de acordo com os respetivos requisitos locais e estatais.

Instruções para o processamento de amostras

1. Siga as precauções standard ao analisar a amostra: utilize luvas, bata de laboratório, proteção ocular ou outro equipamento de proteção individual que o proteja contra eventuais salpicos ou fugas de amostras ou contra uma eventual exposição a agentes patogénicos.
2. Processe a amostra de acordo com os protocolos estabelecidos pelo seu centro/laboratório.
3. Descarte os recipientes para recolha de amostras de acordo com os protocolos para a eliminação de resíduos com risco biológico do seu centro/laboratório.



Bibliografia:

1. Nickander, K et al. Urine culture transport tubes: effect of sample volume on bacterial toxicity of the preservative. J Clin Microbiol. 1982, 15(4):593.
2. Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI), Urinalysis - Approved Guideline – Third Edition, GP16-A3, Wayne, PA, 2009.
3. Cabedo C, et al. A técnica de recolha da urina é importante para se evitar a contaminação das amostras? Atend. Primário 2004;33(3):140-4. 2003.

Glossário de símbolos:

REF Número de catálogo	LOT Código de lote	Consulte-se as instruções de uso na página web www.deltalab.es/eifus	QTY Quantidade
IVD Dispositivo médico para diagnóstico in vitro	Non riutilizzare	Não utilizar se a embalagem estiver danificada	Precauções
Mantenha-o fora da luz do sol	Fabricante	Data de fabricação	CE Marcação CE
UDI Identificação única do dispositivo	STERILE A Estéril usando técnicas de processamento asséptico	STERILE R Estéril por radiação	STERILE EO Estéril por óxido de etileno
Prazo de validade			

No caso de um incidente grave* relacionado com o produto, notifique a Deltalab, S.L. bem como a autoridade competente do Estado em que o usuário está estabelecido. *Entende-se por "incidente grave" aquele que acarreta a morte ou grave deterioração da saúde do doente ou usuário ou uma grave ameaça à saúde pública.

